

# Manuel utilisateur

## Procédure de nettoyage

---

## Table des matières

1.	Destination .....	3
2.	Avertissements et mises en garde.....	3
3.	Chariot d'ordinateur .....	3
3.1.	Ordinateur.....	3
3.2.	Autres composants .....	4
4.	Écran .....	4
5.	Accessoires de réalité virtuelle.....	5
6.	Plateformes Static VR .....	5
7.	Plateformes MotionVR .....	5

## 1. Destination

Ce document a pour but de fournir les informations nécessaires pour le nettoyage des accessoires et composants matériels fournis par Virtualis.

## 2. Avertissements et mises en garde



### ATTENTION

Les points suivants doivent être utilisés comme des lignes directrices, référez-vous toujours au guide de fabrication du produit pour les instructions de nettoyage concernant des produits ou des composants spécifiques.



### ATTENTION

Portez toujours des gants de protection lors du nettoyage et de la désinfection de l'équipement.



### RECOMMANDATION

Dépoussiérez régulièrement la station à l'aide d'un chiffon doux, humide et antistatique imbibé d'une solution de nettoyage.

## 3. Chariot d'ordinateur



### ATTENTION

Eteindre et débrancher le système du réseau électrique avant le nettoyage.

### 3.1. Ordinateur

**ATTENTION**

Ne pas vaporiser ou verser de nettoyeurs liquides sur l'unité centrale. Le liquide pourrait pénétrer dans les orifices de ventilation. Utilisez uniquement un chiffon doux imbibé d'une solution de nettoyage.

L'unité centrale peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux imbibé de produits nettoyants et désinfectants couramment utilisés dans les hôpitaux, comme de l'alcool isopropylique et des solutions de nettoyage neutres.

Substances à ne pas utiliser :

- Diluants, benzine, alcool.
- Insecticides ou autres éléments volatils.
- Solvants organiques tels que l'acétone et le toluène.

**3.2. Autres composants****ATTENTION**

Évitez de renverser des liquides sur les composants électriques.

Ne pas utiliser de produits abrasifs.

Utilisez de l'alcool isopropylique ou des solutions de nettoyage neutres.

**4. Écran****ATTENTION**

Ne pas vaporiser ou verser de nettoyeurs liquides sur les orifices d'aération de l'écran.

**ATTENTION**

Lors du nettoyage de l'écran, veillez à ne pas renverser de liquide sur l'unité centrale.

Essuyez doucement la saleté sur la surface de l'écran avec un chiffon doux imbibé d'une solution de nettoyage neutre.

Substances à ne pas utiliser :

-  Diluant, benzine, alcool.
-  Insecticides ou autres éléments volatils.
-  Solvants organiques tels que l'acétone et le toluène.
-  Éviter tout contact à long terme avec des produits en caoutchouc ou en vinyle.

Ne frottez pas la surface de l'écran LCD avec un objet rugueux et ne pressez pas avec force sur la surface de l'écran LCD.

## 5. Accessoires de réalité virtuelle



### RECOMMANDATION

Référez-vous aux instructions d'utilisation fournies avec les accessoires.

Mousse du casque :

Nettoyez-la avec une lingette antibactérienne/désinfectante non abrasive entre les utilisations **ou** conformément à la politique de votre établissement ou de votre institution pour le nettoyage des mousses non poreuses. Il est également possible d'utiliser une barrière de protection supplémentaire entre le patient et les composants du casque de réalité virtuelle.

## 6. Plateformes Static VR

Les plateformes sont fournies à l'état non stérile et ne sont pas compatibles avec les techniques d'autoclave ou de stérilisation. Ne pas stériliser à l'autoclave.

Désinfecter les plaques avant utilisation. Il convient d'utiliser des désinfectants de niveau faible ou intermédiaire (par exemple, des lingettes alcoolisées).

Ne pas utiliser d'eau de Javel pour nettoyer les pièces en plastique, préférer les mélanges d'alcool.

## 7. Plateformes MotionVR



### ATTENTION

Eteindre et débrancher la plateforme MotionVR du réseau électrique avant le nettoyage.

**ATTENTION**

Protégez les composants électriques et électroniques des liquides. En cas d'éclaboussure, nettoyez et séchez soigneusement la zone humide avant de rebrancher le système au réseau électrique.

**Plastique et surfaces métalliques :**

Nettoyez avec une lingette antibactérienne/désinfectante non abrasive ou un chiffon humide entre les utilisations ou lorsque la surface est visiblement sale. Veillez à ce que le produit de nettoyage soit compatible avec les surfaces en métal peint et en plastique. Les surfaces peuvent également être dépoussiérées à l'aide d'un chiffon de nettoyage en microfibres.

**Surfaces en néoprène :**

Nettoyez avec une lingette antibactérienne/désinfectante non abrasive entre les utilisations ou conformément à la politique de nettoyage des matériaux en néoprène de votre établissement ou institution.

**Surfaces en tissu :**

Nettoyez avec une lingette antibactérienne/désinfectante non abrasive entre les utilisations. Il est également recommandé d'utiliser une barrière protectrice entre tous les tissus ou toute surface similaire. Dans certains cas, il est possible d'enlever le composant, de le laver à la main, et de le laisser sécher à l'air libre.